

# DMV Soft Lens Handler

Produkt jest przeznaczony do zakładania i zdejmowania miękkich soczewek kontaktowych. Zapewnia czystość i bezpieczeństwo podczas posługiwania się soczewką. Pomaga zapobiegać tworzeniu się zmarszczek wokół oczu. DMV Soft Lens Handler ułatwia posługiwanie się soczewkami kontaktowymi osobom mającym długie paznokcie u rąk. Nie stosować do sztywnych soczewek kontaktowych.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

► **ZDEJMOWANIE SOCZEWKI:** Należy stabilnie przyłożyć końcówki chwytające do przedniej powierzchni soczewki kontaktowej, a następnie delikatnie przycisnąć je do siebie i zdjąć soczewkę z powierzchni oka. ► **ZAKŁADANIE SOCZEWKI:** Należy umieścić zwilżoną soczewkę kontaktową na węższym końcu urządzenia i delikatnie przycisnąć ją do centralnej części oka. ► **CZYSZCZENIE:** Umyć ciepłą wodą z mydłem, opłukać i pozostawić do wyschnięcia. ► **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Połknięcie produktu może spowodować zadławienie. Nie przykładać bezpośrednio do powierzchni oka. Stosowanie jest możliwe tylko na zdrowej rogówce.

**Wytwórca:** DMV Corporation, 1024 Military Road,  
Zanesville, OH 43702-0878, USA

**Autoryzowany przedstawiciel:** Prolens AG  
Josefstrasse 53, P.O.B. 1878, CH-8031 Zürich

**Dystrybutor w Polsce:** Aqua Lens

ul. Taborowa 18, 02-699 Warszawa, tel./fax: 22 831-32-40  
aqualens@soczewki.biz, www.soczewki.biz



Data wydania:  
16.12.2013