

Opis produktu

Wskazania do stosowania

Płyn PlatinCare ma szczególne właściwości bakteriobójcze, a jednocześnie usuwa osady powstające codziennie na powierzchni soczewek kontaktowych.

Płyn PlatinCare jest przeznaczony do dezynfekowania soczewek kontaktowych wszystkich typów, oprócz kolorowych/kosmetycznych.

Skład

Nadtlenek wodoru 3%, dwuzasadowy fosforan sodu, jednozasadowy fosforan sodu, EDTA, kwas fosfonowy, chlorek sodu, kwas borowy, woda demineralizowana.

Ostrzeżenia i środki ostrożności


1. Po otwarciu opakowania, należy zużyć zawartość w ciągu 60 dni.
2. Przechowywać w temperaturze od 5° do 25°C.
3. Nie używać płynu, jeżeli plomba została uszkodzona przed pierwszym użyciem.
4. Powtórzyć procedurę czyszczenia, jeżeli soczewki były pozostawione w tym samym roztworze przez ponad 24 godziny.
5. Nie stosować produktu w przypadku uczulenia lub alergii na którykolwiek ze składników.
W przypadku wystąpienia podrażnienia lub innych zdarzeń niepożądanych, należy zdjąć soczewki, przerwać stosowanie i skonsultować się ze specjalistą.
6. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
7. Nie myć soczewek wodą z kranu.
8. NIE POŁYKAĆ roztworu.
9. Nie stosować leków do oczu podczas noszenia soczewek kontaktowych, jeżeli nie zostały przepisane przez lekarza.
10. Nie używać pojemnika na soczewki z neutralizującą gwiazdką platynową z płynami innymi niż PlatinCare.
11. Nie zakładać soczewek kontaktowych bezpośrednio po użyciu płynu PlatinCare, jeżeli nie przeprowadzono procesu neutralizacji.

Jednofazowy płyn na bazie nadtlenu wodoru do czyszczenia soczewek kontaktowych: miękkich, silikonowo-hydrożelowych i RGP.



PLATINCARE

Jednofazowy płyn na bazie nadtlenu wodoru do czyszczenia soczewek kontaktowych: miękkich, silikonowo-hydrożelowych i RGP.

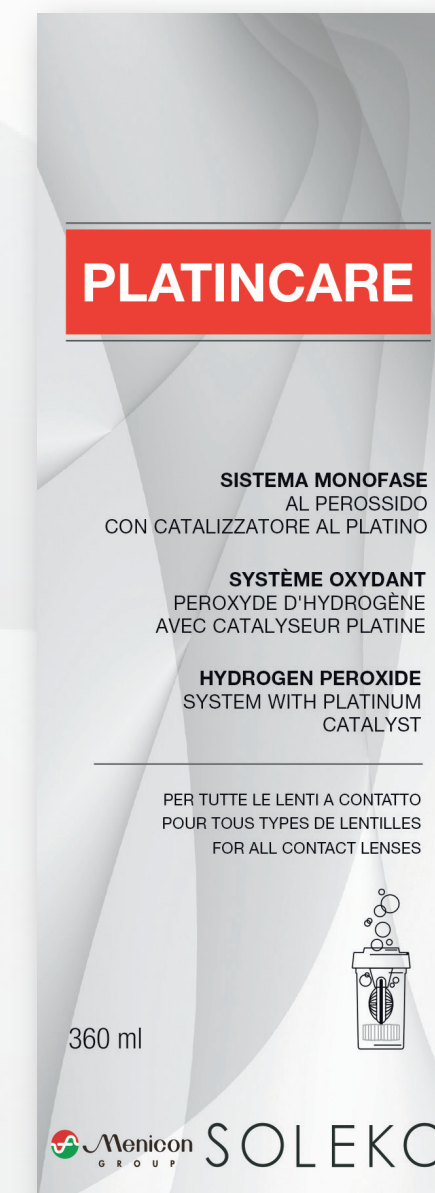

PlatinCare zapewnia głębokie oczyszczanie soczewek kontaktowych w ciągu 6 godzin, a cały proces jest prosty i przyjazny dla użytkownika.

PlatinCare to jednofazowy płyn na bazie nadtlenu wodoru do pielęgnacji soczewek kontaktowych, oferujący dokładną i skuteczną dezynfekcję soczewek kontaktowych oraz usunięcie osadów białkowych.

Płyn bez konserwantów pozwala ograniczyć podrażnienia oczu.

Przyjazny dla użytkownika

Jednofazowy płyn na bazie nadtlenu wodoru bez konserwantów, przeznaczony do pielęgnacji soczewek kontaktowych.

Dezynfekcja i neutralizacja odbywają się jednocześnie.

Należy zanurzyć soczewki kontaktowe w płynie bez pocierania.

Proces dezynfekcji jest widoczny, ponieważ podczas neutralizacji powstają pęcherzyki.

Czyszczenie

Głębokie i skuteczne usuwanie osadów białkowych i zanieczyszczeń oraz dezynfekcja soczewek kontaktowych w ciągu 6 godzin.

Szeroki zakres zastosowań


Odpowiedni do soczewek kontaktowych miękkich, silikonowo-hydrożelowych i RGP.




Przyjazny dla użytkownika proces czyszczenia



Umyć ręce i zdjąć soczewki kontaktowe.

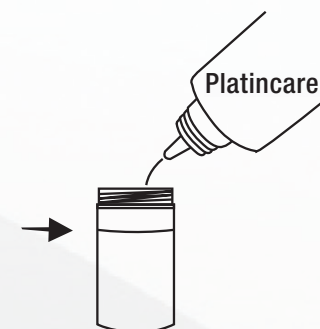

Napełnić pojemnik na soczewki płynem PlatinCare do zaznaczonej linii.

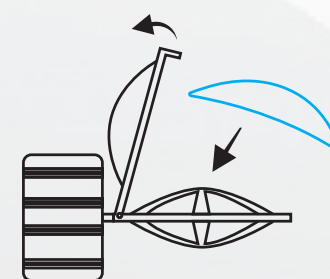

Umieścić soczewki w pojemniku tak, aby były zanurzone w płynie.

Ostrożnie zamknąć pojemnik.

Pojemnik na soczewki powinien być cały czas w pozycji pionowej.




Jeżeli produkt działa prawidłowo, po kontakcie platynowej gwiazdki z płynem powstają pęcherzyki tlenu.

Należy umieścić soczewki kontaktowe w płynie PlatinCare na co najmniej 6 godzin lub na całą noc.



Przepłukać soczewki roztworem soli fizjologicznej.

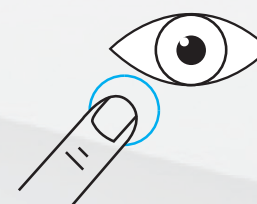

Założyć soczewki kontaktowe.