

# Usuwanie osadów tłuszczowych

## Spray & Clean

Roztwór przeznaczony do oczyszczania wszystkich typów soczewek gazoprzepuszczalnych. Usuwa osady, zapewniając czystą i komfortową soczewkę.

### Jak stosować Spray & Clean?

**Krok 1:** Zdjąć soczewkę z oka i umieścić na dłoni. Następnie, spryskać soczewkę z jednej i drugiej strony (po jednej dawce preparatu).

**Krok 2:** Delikatnie pocierać palcami soczewkę trzymaną na wierzchu dłoni lub pocierać soczewkę między palcami. Umieścić soczewki na odpowiednich uchwytach w pojemniku i przepłukać je roztworem MENICARE PURE.

**Krok 3:** Napełnić pojemnik do przechowywania soczewek roztworem MENICARE PURE i zamknąć zakrętkę.

**Krok 4:** Przed założeniem soczewek, należy zawsze przepłukać je roztworem MENICARE PURE. Można założyć soczewki. Wylać z pojemnika roztwór, w którym były przechowywane soczewki.



Aerazol 15 ml  
Nie zawiera konserwantów

### Częstotliwość stosowania

Jeżeli łzy pacjenta zawierają dużą ilość tłuszczów, preparat można stosować codziennie.

### Skład

- Sulfonian sodowy olefiny 0,4%
- Eter polioksyetylenowy alkilu 0,6%
- EDTA 0,57%
- Woda demineralizowana q.s. 100

(1) Efficacy of rigid gas permeable contact lens multi-purpose care solutions against *Acanthamoeba* Simon Kilvington. Uniwersytet w Leicester, Leicester, Wielka Brytania. Plakat BCLA 2014.

(2) Test rozpuszczania tłuszczów (źródło Menicon Co., Ltd).

(3) Antimicrobial properties of a new rigid gas-permeable contact lens multipurpose solution formulated with Polylysine as disinfecting agent. Osamu Mori, MS and Megumi Toyohara, MS. R&D center, Menicon Co. Ltd., Kasugai, Japonia. Plakat BCLA 2014.

(4) Raport badawczy firmy Menicon nr 914 / Dane firmy Menicon Pharma nr RE05058.

(5) Raport z testu wyrobu medycznego nr 96Z008 / Dane firmy Menicon Pharma nr RE05059.

(6) Raport z testu wyrobu medycznego nr 97m010 / Dane firmy Menicon Pharma nr RE050060.

(7) Raport z testu wyrobu medycznego nr 98m054 / Dane firmy Menicon Pharma RAPR9821.

(8) Pr. Harf-Monteil report 1998 / Dane firmy Menicon Pharma nr RAPR9822.

(9) Commissariat à l'Energie Atomique rapport nr 277111- Evaluation des protocoles de décontamination de lentilles rigides perméables pour inactiver et/ou éliminer les prions / Dane firmy Menicon Pharma nr E02022.

CE 0483 MENICARE PURE jest produkowany przez Menicon Co., Ltd, PROGENT oraz Spray & Clean są produkowane przez Menicon Pharma SAS. Przed użyciem każdego z produktów, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania.

Dodatkowych informacji udzieli Państwu regionalny przedstawiciel firmy Menicon:



tel. 22 831 32 40, 607 716 559 aqualens@soczewki.biz, www. soczewki.biz



Menicon

www.menicon.com